

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наконечники стоматологические серии MERCURY

Фошань Джингл Медикал Эквипмент Ко., Лтд

Адрес: 1-2Ф, Плант 4, NO.1, Хуафу Бей Роад, Чачень, 528000, Фошань, Гуандун, Китай

Инструкция по эксплуатации

Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации пневмодвигателя необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.



Описание изделия

Предназначен для использования в бормашинах и стоматологических установках в качестве привода стоматологических низкоскоростных наконечников. Подача водяной струи для охлаждения бора в наконечнике происходит внутри самого пневмодвигателя.

Технические характеристики:

Давление воздуха (КПа (кгс/см ²))	Скорость вращения мотора (об. в мин.)	Потребление воздуха (л/мин)	Вес (г)
245 (2.5)	22000	42	90
294 (3.0)	25000	51	90
392 (4.0)	27000	72	90

Уровень шума, не более, дБ 65

Правила техники безопасности

Если при работе пневмодвигателя обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов.

Не ронять, не подвергать пневмодвигатель нагрузкам и ударам!

Пневмодвигатель должен храниться очищенным и смазанным.

При проведении дезинфекции не допускается погружение пневмодвигателя в дезраствор.

Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке пневмодвигателя.

Очистка двигателя: Почистите инструмент снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор.

При проведении дезинфекции не допускается погружение двигателя в дезраствор. Смазывайте картридж перед каждым циклом стерилизации. Двигатели необходимо смазывать перед каждым рабочим циклом. Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке двигателя.

Замена кольцевого уплотнителя

Нажмите на кольцевой уплотнитель большим и указательным пальцами, продвиньте вперед и снимите кольцевой уплотнитель. Установите новый кольцевой уплотнитель и смажьте его с помощью распылителя. Нельзя использовать вазелин и другую густую смазку.

Смазка пневмодвигателя

Смазка производится любым многофункциональным смазочным спреем для стоматологических наконечников.

Смазывайте пневмодвигатель в течение 1-2 секунд.


Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в отверстие подачи воздуха до упора и распылите спрей в течение 1-2 секунд.

Подключите пневмодвигатель, включите в работу.

После остановки бора удалите с мотора салфеткой излишки масла.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы, проверьте работу пневмодвигателя вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности.

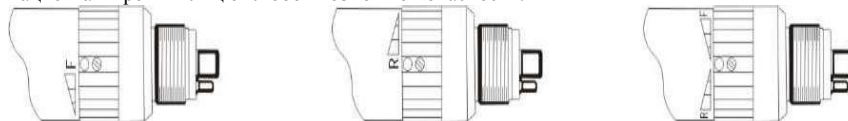

Переключатель

Вращение вперед (по часовой стрелке): поверните кольцевой переключатель в (F) сторону.

Вращение назад: поверните кольцевой переключатель в (R) сторону.

Когда переключатель находится между (F) или (R) мотор прекратит вращение.

Упаковка

Пневмодвигатели стоматологические серии MERCURY поставляются в оригинальной упаковке изготовителя с поролоновыми вкладышами, защищающей наконечники от внешних воздействий и исключающей повреждения в условиях транспортировки, с маркировкой на русском языке.

Маркировка

На маркировке нанесена следующая информация:

- Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия, модель;
- серийный номер;



- знак указывает на возможность автоклавирования

Хранение и транспортировка пневмодвигателя

Процедура хранения и транспортировки должна осуществляться при температуре от -10 до +35 °C и относительной влажности до 80% в хорошо вентилируемых помещениях. Избегайте воздействия коррозионных газов.


Комплект поставки:

1. Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000 - 1 шт.
2. Инструкция – 1 шт.

Утилизация

Стоматологические наконечники относятся к опасным медицинским отходам. Дезинфекция и уничтожение данного вида медицинских отходов производится в соответствии с местными требованиями утилизации опасных медицинских отходов.

насадка масляного спрея угловой/прямой наконечник

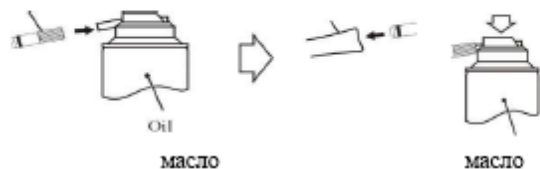

Гарантия

1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение 90 дней с даты реализации инструмента
2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи.
3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом.
4. Действие гарантии прекращается по истечению ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом.
5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии.
6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.
7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика. Для настройки рабочего давления воздуха в пневмодвигателе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов.

Производитель: Фошань Джингл Медикал Эквипмент Ко., Лтд
Адрес: 1-2Ф, Плант 4, NO.1, Хуафу Бей Роад, Чачень, 528000, Фошань, Гуандун, Китай
По ремонту и техническому обслуживанию обращаться к продавцу

Гарантийный талон

Номер пневмодвигателя _____

Покупатель _____

Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии

ознакомлен _____

Дата продажи _____

Продавец _____ М.П.

Сведения о ремонте
